

OSMOZ™ er en steril engangsforbindning beregnet til at blive anvendt som en trykforbinding på arteriovenøse eller arterielle punkteringssteder. Den er specielt designet til vaskulære tilgange til arteriovenøse fistler til hæmodialyse.

OSMOZ™ er en steril engangsforbinding med videnskabeligt dokumenteret effektivitet, beregnet til brug som en kompressiv forbinding på arteriovenøse eller arterielle punkteringssteder.

Hæmostase sikres ved hjælp af en patenteret mikroperforeret klæbefilm, der påvirker blodets rheologi for at fremskynde dannelse af blodpladeproppen. Kliniske tests har vist, at den reducerer blødningstiden til 3 minutter i 80% af tilfældene.

Den gennemsigtige film beskytter også mod utilsigtet blodeksponering og muliggør overvågning af koagulationsprocessen. Når den er foldet ned, sikrer den bløde, ikke-vævede del en delvis kompression og forvandler OSMOZ™ til en behagelig og diskret forbinding til slutningen af dialysen.

OSMOZ™ er også velegnet til alle typer af arteriovenøse fistler (AVF).

Det får du med OSMOZ™:

- Reduktion af blødningstiden
- Nem overvågning af koagulationsprocessen
- Beskyttelse mod blodsprøjt
- 2-i-1-løsning: Kompressions- og slut-dialyseforbinding (ved foldning af den bløde non-woven del)

At forbedre patientens livskvalitet er vores prioritet, derfor er OSMOZ™ klæbemiddel biokompatibelt og indeholder ikke nogen kemisk middel, beregnet til at lette hæmostase.


Varenummer	Beskrivelse	Indhold
NK OSMOZ	Hæmostatisk fistelplaster, OSMOZ™	100 stk. pr. pakke

# OSMOZ™ - Hæmostatisk fistelplaster

## HOW TO USE IT



Partial removal of the needle and application of the Osmoz™ on the puncture site and needle.

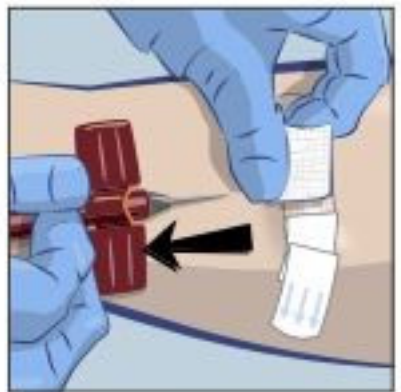

Application of the compress over the Osmoz™. Complete removal of the needle.



Compression for 3 minutes and control of the bleeding point



Checking every minute until the clot is formed. When hemostasis is obtained, fold the Osmoz™ soft non-woven part by pulling lightly to get a partial compression.