


Solukat Si™ - steril engangsforbinding

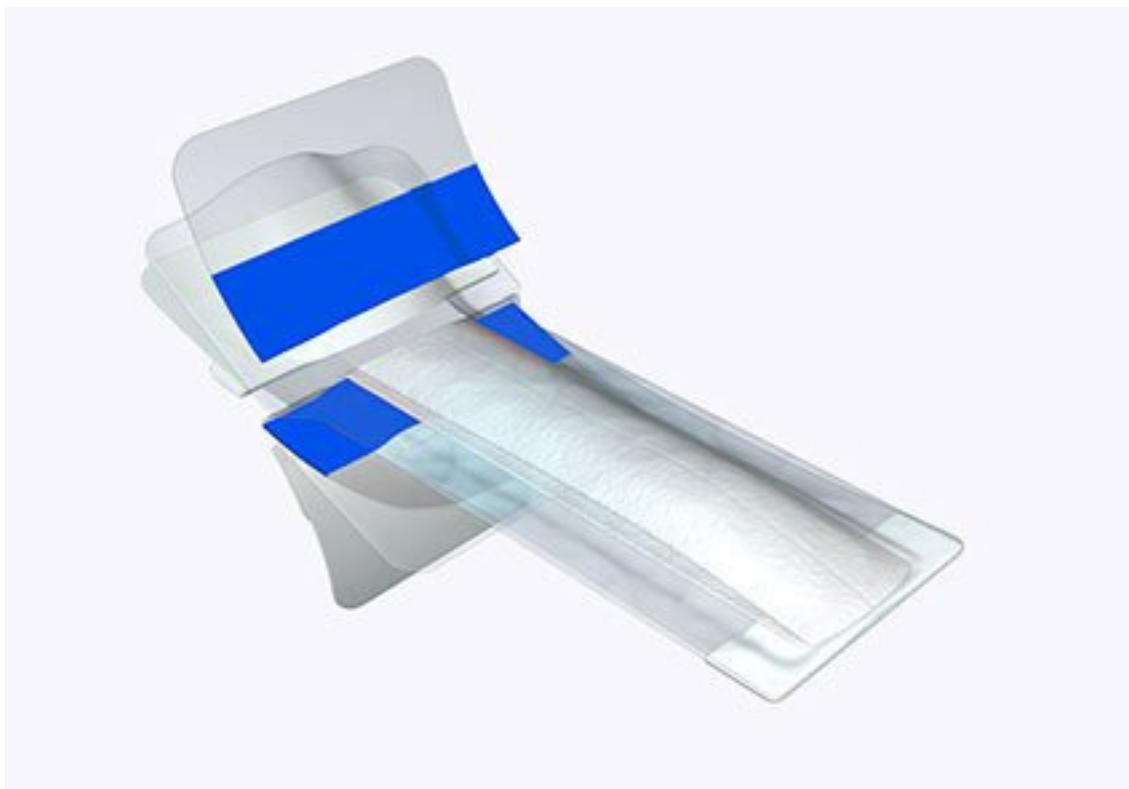

Solukat Si™ er en steril engangsforbinding, der er designet til fuldt ud at beskytte et central venekateter (CVC), i overensstemmelse med de strengeste hygiejneprotokoller, samtidig med at den er nem at bruge.

Solukat Si™ er lavet af polyurethan, et blødt materiale med unikke egenskaber, da det samtidig fungerer som en bakteriebarriere, er vandtæt og højpermeabelt for gasser (åndbart).

Dets asymmetriske puder gør det muligt, at vælge at lade udgangsstedet være synligt for bedre overvågning, eller skjule det for mere diskretion.

Når det påføres efter f.eks. en dialysesession, kan Solukat Si™ forblive på huden i helt op til 3 dage, og give tilstrækkelig beskyttelse fra udgangsstederne til connectorerne indtil næste session.

Silikoneklæbemidlet på Solukat Si™ vil beskytte de mest sensitive hudområder, ved at øge brugerkomforten og sikre smertefri fjernelse.

Solukat Si™ hjælper med til at:

- Reducere infektionsrisikoen
- Forbedre hudtolerancen
- Gøre det nemmere at påføre for sygeplejerskerne

At forbedre patienternes livskvalitet er vores prioritet, derfor er Solukat Si™ en perfekt forsegleet enhed, der giver patienten mulighed for at nyde at bade igen.

| Varenummer | Beskrivelse | Æske indhold |
|------------|---------------------------|--------------|
| NK SOLUKAT | Solukat Si™ Pads, sterile | 20 stk. |

Solutat Si™ - steril engangsforbinding

HOW TO USE IT



Slide the catheter ends into the bag and up to the insertion points.

⚠ Place the adhesive strip on the skin side if you want to see the exit site. Otherwise, place the adhesive strip on the other side.




Remove the protective paper and stick the upper part.

Remove the protective paper from the lower part.



Remove the blue marking strips.

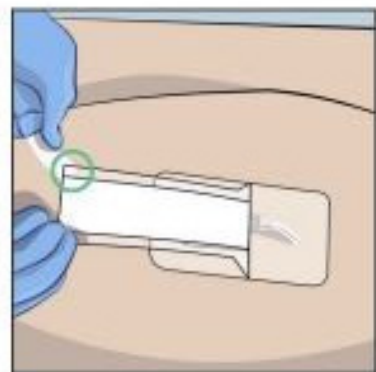

Remove the protective paper from the adhesive strip. Solutat Si™ is now ready for use.

